

MASCHERINA FILTRANTE

DISPOSITIVO INDIVIDUALE A SCOPO PRECAUZIONALE

La visiera, per funzioni, non si configura né come DM né come DPI – ART. 16 DEL 18/2020

La mascherina in questione è definita filtrante ad uso singolo esclusivo della collettività

Conforme alle indicazioni della circolare del ministero della salute:

Comma 2 . Art 16 decreto Cura Italia. 0003572-P-18/03/2020

NON È UN PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

CARATTERISTICHE:

- Tessuto **MASK®** by **Sitip** composizione 80% Poliestere, 20% Elastane
- Doppio Strato con trattamento anti goccia **Acquazero®** by **Sitip** del peso di 220 gr/mq
- Approvato **Bluesign**
- Standard 100 **Oeko-Tex**
- Peso della mascherina 15g
- **RIUTILIZZABILE e LAVABILE FINO a 20 VOLTE**



La mascherina è lavabile a 40° con asciugatura a tamburo per riattivare il trattamento anti goccia oppure, in assenza di asciugatrice, riattivare con ferro da stiro a vapore per 5 secondi.

L'eventuale sterilizzazione deve essere eseguita con lieve immersione in ipoclorito di sodio al 10% (candeggina), lavare con sapone e risciacquare abbondantemente con acqua.

Non sono presenti restrizioni secondo il reg. (CE) num. 1907/2006 (REACH)

Per sicurezza lavare e sterilizzare prima dell'uso



Costo € 9,50 cad. iva incl.

